

DITALE per l'IGIENE ORALE in SPUGNA con Fibra ARGENTO

- ✓ DITALE per la PULIZIA dei DENTI da inserire nel dito indice ed allacciare su quello medio.
- ✓ Con il DITALE inumidito leggermente con acqua (preferibilmente tiepida) effettuare una leggera frizione sui denti e sulle gengive, per lavare i denti ed eliminare eventuali residui di cibo.
- ✓ Questa SPUGNA rimuove la placca ed il tartaro senza danneggiare le gengive e contemporaneamente l'ARGENTO, rimuove i batteri e disinfetta il cavo orale.
- ✓ La regolarità di questo trattamento, previene il formarsi della carie e di tutte le relative conseguenze.

PANNO BI-FASICO per l'IGIENE di OCCHI ed ORECCHIE in tessuto multistrato di SPUGNA più Fibra ARGENTO

- ✓ Per la PULIZIA degli OCCHI utilizzare il lato del PANNO in SPUGNA (verde) bagnato con acqua tiepida, che toglie delicatamente la sporcizia, nonché (grazie all'azione antibatterica dell'argento) previene possibili infiammazioni, senza danneggiare l'occhio.
- ✓ Per la PULIZIA delle ORECCHIE utilizzare il lato in ARGENTO del PANNO bagnato solo con acqua che rimuove lo sporco superficiale dal padiglione auricolare, nonché elimina il cerume in eccesso per evitare (grazie all'azione battericida dell'argento) possibili infezioni batteriche.

All'interno foglio illustrativo COMPOSIZIONE e PROPRIETA' dei TESSUTI, ISTRUZIONI ed AVVERTENZE per l'USO.

I prodotti **SalusPET Ag**
sono distribuiti da: FABE ITALY srl
Via Beppino Smania, 1 - 35129 Padova



info@fabeitaly.com
www.fabeshop.it
www.saluspetag.it
SERVIZIO CLIENTI
+39 049 8364177



PULIZIA E IGIENE
in una carezza



MIGLIORA L'IGIENE DEL TUO AMICO A 4 ZAMPE:

Occhi, orecchie e bocca, sempre puliti e protetti

Pratico DITALE in microspugna e fibra d'argento antibatterica per DENTI del tutto IGIENIZZATI.

Comodo PANNO BI-FASICO in tessuto multistrato di spugna con fibra d'argento battericida per OCCHI e ORECCHIE sempre PULITI.



ARTICOL RIUTILIZZABILE PER OLTRE 300 TRATTAMENTI



Scegli prodotti RIUTILIZZABILI,
NON USA e GETTA

*L'attività Battericida dei tessuti realizzati con filati in Argento è certificata dalla normativa internazionale UNI EN ISO 20645.

Articoli per l'igiene degli animali

MODALITA' D'USO DEL DITALE PER L'IGIENE DENTALE

in MicroSPUGNA e Fibra ARGENTO **SaluSclean**

- ✓ Inserire il DITALE nel dito indice ed allacciarlo sul medio.
- ✓ Inumidire leggermente con acqua (preferibilmente tiepida) la SPUGNA ed effettuare una leggera frizione sui denti e sulle gengive, per lavare i denti ed eliminare eventuali residui di cibo.
- ✓ Utilizzando la SPUGNA a secco, è possibile rimuovere il tartaro presente sulla superficie dentale.
- ✓ Questo trattamento igienico, elimina placca e tartaro senza danneggiare le gengive. L'azione antibatterica dell'ARGENTO ha un effetto disinfettante del cavo orale, rimuove i batteri e previene il formarsi della carie.



COMPOSIZIONE MicroSPUGNA e Fibra ARGENTO:
97% PL (multibava EVO-TEX) - 3% Fibra ARGENTO/CARBONIO (SILblack EVO-TEX)

PROPRIETA' dei TRATTAMENTI

- ✓ Terminati i trattamenti, per l'ottimale pulizia del DITALE e del PANNO, è sufficiente effettuare un semplice LAVAGGIO A MANO in acqua fredda con sapone (es. Marsiglia), e lasciare che si asciughi in luogo areato, gli Ioni Ag+ presenti nel tessuto, ne determineranno l'auto-igienizzazione.
- ✓ Per mantenere inalterate le proprietà del prodotto, NON utilizzare la lavatrice e NON USARE detersivi liquidi, ammorbidenti e candeggianti. E' possibile usare un solo DITALE o PANNO per più animali, in quanto la trasmissione dei batteri ed altri agenti patogeni è totalmente inibita dalla presenza degli IONI ARGENTO (Ag+).
- ✓ Grazie ai FILATI (ricoperti in PURO ARGENTO + CARBONIO) con questi ARTICOLI si possono eseguire trattamenti 100% NATURALI e non solo di PULIZIA delle parti trattate, ma anche di IGIENE per la protezione dalle infiammazioni derivanti da qualsiasi tipo di sporcizia.

ISTRUZIONI
LAVAGGIO



(Importante: lavare a mano con sapone "tipo" MARSIGLIA, assolutamente SENZA ammorbidenti e/o candeggianti)

MODALITA' d'USO del PANNO BI-FASICO

in tessuto multistrato di SPUGNA più Fibra ARGENTO per l'igiene di OCCHI ed ORECCHIE **Silvercare**


LATO SPUGNA (colore VERDE) per la PULIZIA degli OCCHI

- ✓ La frequenza della pulizia degli occhi dipende dallo stato di salute dell'animale, perché se di norma può essere fatta anche solo due volte alla settimana, in presenza di problemi, la pulizia deve essere fatta una o due volte al giorno.
- ✓ Per togliere la sporcizia ed evitare possibili infezioni senza danneggiare l'occhio (che è una zona molto delicata), inumidire la SPUGNA con acqua (preferibilmente tiepida) ed effettuare un leggero massaggio facendo attenzione a non fare troppa pressione sull'occhio.



LATO ARGENTO (colore GRIGIO) per la PULIZIA delle ORECCHIE

- ✓ Una pulizia regolare delle orecchie è molto importante soprattutto per evitare l'insorgenza di infezioni e/o otiti.
- ✓ E' perfettamente normale che il cerume si accumuli all'interno dell'orecchio ma quando è in eccesso, si possono creare infiammazioni, efficacemente contrastate dall'utilizzo di questo PANNO ANTIBATTERICO.
- ✓ Per sciogliere tutte le particelle di sporco presenti nella parte più profonda dell'orecchio, è necessario bagnare sufficientemente il panno con acqua (preferibilmente tiepida) e dopo aver posizionato bene le dita alla base dell'orecchio, massaggiare accuratamente la parte.
- ✓ E' importante NON UTILIZZARE i cotton fioc, poiché possono danneggiare le parti interne dell'orecchio, (come il timpano), nonché spingere le secrezioni dell'orecchio ancora più in profondità.

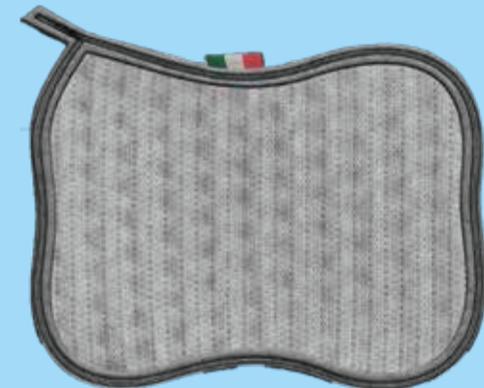

COMPOSIZIONE SPUGNA/ARGENTO MultiSTRATO:
73% PL (multibava EVO-TEX) - 24% PU (espanso) - 3% Fibra ARGENTO/CARBONIO (SILblack EVO-TEX)